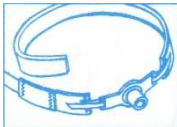
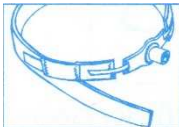
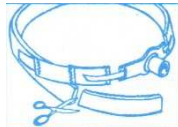


 ARTESANO FRANCISCO CHINER	FICHA TÉCNICA	64fm01160001
		CNTA2014
Elaborado por: Avelino Tendero Ferrús Fecha: 01/06/2013	Aprobado por: Adoración Chiner Tomás Fecha: 15/06/2013	
Última revisión: 30/12/2013	Edición Nº 2	

DESCRIPCIÓN:	CINTA SUJECCIÓN CANULAS TRAQUEOTOMÍA		
MARCA	ARTESANO CINTA		
PRESENTACIÓN:	NO ESTÉRIL.		
CLASIFICACION DEL PRODUCTO	TIPO I		
REFERENCIA FRANCISCO CHINER	CNTA2014		
CODIGO EAN13 DE PRODUCTO	8436530074546		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO	Cinta fabricada con algodón especial hipoalergénico, para evitar irritación en la piel. De tamaño ajustable al incorporar un tramo con velcro. Instrucciones de uso: 1.- Insertar cada tramo de cinta con velcro por cada uno de los orificios de la placa de la cánula. 2.- Despegar el tramo con velcro de la cinta. 3.- Ajustar hasta una compresión idónea. 4.- Cortar el exceso de cinta     Precauciones: Antes de usar el producto consulte las instrucciones de uso. Para evitar aflojamientos revise periódicamente la compresión idónea. No lavar el producto. Producto de un solo uso y para un único paciente. Se recomienda el recambio después de ser usado 24 horas.		
PRESENTACIÓN ENVASE	En envase unitario		
FOTO DEL PRODUCTO			